



GRAM DE SECREÇÃO VAGINAL

Instrução de Coleta


1. Colete a secreção vaginal usando um dos instrumentos adequados abaixo

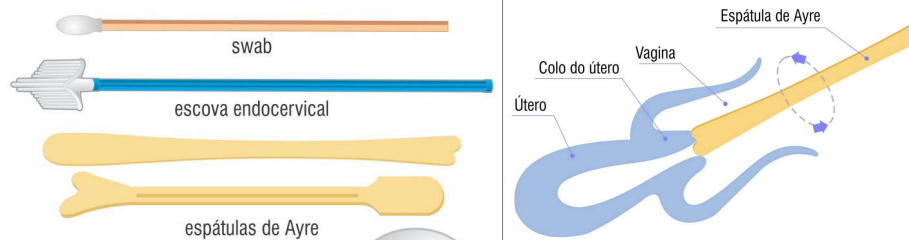

2. Coloque uma gota da secreção vaginal no centro da lâmina e espalhe uniformemente de modo circular sobre a lâmina

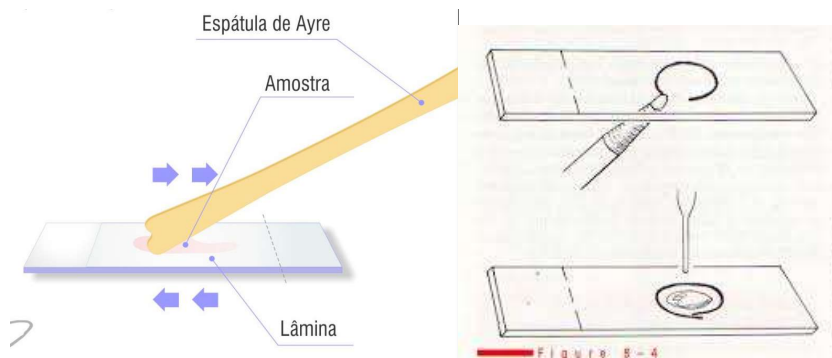

3. Identifique a lâmina adequadamente, coloque no frasco coletor de lâmina sem nenhum reagente e/ou conservante, e encaminhe o exame ao laboratório

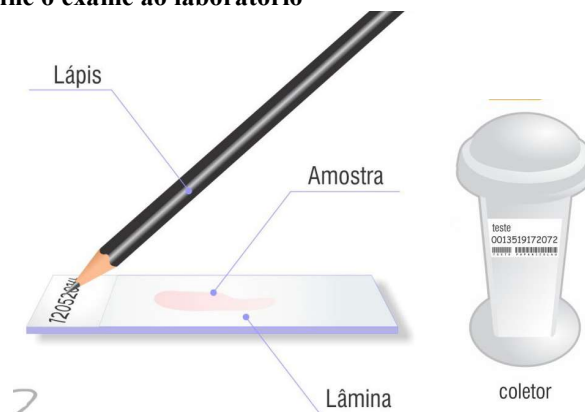

4. Após a coleta enviar ao laboratório em no máximo 5 dias